



WEPERE

GARD

CORSETTO LOMBARE

REF WE1110



DESCRIZIONE

La struttura realizzata in tessuto elastico traspirante calibrato, lo rende utile per il controllo di lievi patologie che interessano il tratto lombare. Facile da indossare, dall'ottima vestibilità, assicura il corretto sostegno alla schiena e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane. Adatto alla pratica sportiva, inclusi gli sport acquatici grazie all'idrorepellenza del tessuto.

CARATTERISTICHE

- Tessuto SPACER, 100% traspirante.
- Chiusura anteriore a velcro.
- Tiranti elastici posteriori.
- Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate.
- Altezza anteriore 18 cm, posteriore 25 cm.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi posturali.

INDICAZIONI

Prevenzione • lombalgie • lombo sciatalgie • contratture muscolari • sostegno nello sport e nella vita quotidiana • traumi lievi della colonna lombare • spondiloiartrosi • discopatie • cedimenti vertebrali lombari • lombalgie da automobile.

APPLICAZIONE

È consigliabile indossare il tutore sopra una maglietta.

1. Aprire il corsetto completamente.
2. Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali "obliqui piccoli").
3. Indossare il corsetto e chiudere il velcro addominale quanto basta per stabilizzarlo correttamente.
4. Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui.
5. Prendere i velcri dei tiranti e tirarli fino a raggiungere il velcro grande addominale fissandoli centralmente.
6. Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo inferiore posteriore del corsetto, sia posizionato circa a 5cm dalla metà dei glutei.



Lavare a mano in acqua tiepida



Non mettere in asciugatrice



Non tirare



Non candeggiare



Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017
MNGP489-00 del 24/08/2022



I.A.C.E.R. SRL
Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - ITALY
www.wepere.com



TENORTHO SRL
Via Trento e Trieste 100 - 20853 Biassono (MB) - ITALY
www.tenortho.com

POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

Gli ausili di WEPERE sono generalmente indicati per l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. sezione "indicazioni"). Si raccomanda cautela ed il ricorso al parere di un medico, nell'impiego del corsetto in donne in gravidanza. Allo stesso modo, particolare attenzione va dedicata ai pazienti che presentano patologie o difficoltà respiratorie.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al proprio negozio di fiducia o a WEPERE nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti WEPERE, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una mail all'indirizzo: quality@iacer.it

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.

AVVERTENZE

L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. In caso di eventuali modifiche strutturali o di altro genere, non sono garantite efficacia e garanzia sul prodotto. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.

GARANZIA

WEPERE certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. WEPERE si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. WEPERE potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.



Fabbricante



Distributore



Codice prodotto



Numero lotto



Dispositivo Medico



Leggere attentamente il manuale d'uso



Dispositivo che può essere utilizzato più volte (più procedure) su un singolo paziente.



Non sterile



Attenzione