



WEPERE GARD

EPIKONDYLITIS-BANDAGE
REF WE2108



BESCHREIBUNG

Orthopädische Bandage aus Spacer-Gewebe mit Schaumstoffpolster. Das innovative Design macht diese Bandage zur Sofortlösung für die Behandlung von Epicondylitis. Einfach zu tragen, anatomisch umhüllend, sorgt sie für die gewünschte Wirkung, indem sie Wohlbefinden und Erleichterung bei täglichen Verrichtungen und beim Sport bietet.

MERKMALE

- SPACER-Gewebe, 100% atmungsaktiv.
- Integriertes Schaumstoff-Druckpolster
- Integrierte Klammer zur Regelung des Zugs
- Klettverschluss
- Beidseitig tragbar, universelle Einheitsgröße

BESTIMMUNGSZWECK

Nicht-invasive therapeutische Medizinprodukte zur Korrektur von Haltungsschäden oder zur Stabilisierung der Gliedmaßen.

INDIKATIONEN

Akute oder chronische Epicondylitis • Epitrochleitis • Muskelkontrakturen.

ANWENDUNG

1. Öffnen Sie den Klettverschluss.
2. Ziehen Sie die Bandage an bis der äußere Rand etwa 3 cm (zwei Finger breit) von der Mitte des Ellenbogengelenks entfernt ist.
3. Setzen Sie das Druckpolster auf die Achse des entzündeten Bereichs.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Bandage gut positioniert ist, und ziehen Sie den Gurt gerade fest genug.



Handwäsche
in lauwarmem
Wasser



Nicht im Wasche-
trockner
trocknen



Nicht bügeln



Nicht bleichen



Das Produkt entspricht der EU-Verordnung 745/2017
MNGP501-00 vom 24/08/2022



I.A.C.E.R. SRL
Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - ITALIEN
www.wepere.com



TENORTHO SRL
Via Trento e Trieste 100 - 20853 Biassono (MB) - ITALIEN
www.tenortho.com

PATIENTENPOPULATION UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

WEPERE-Stützprodukte sind in der Regel für Erwachsene über 12 Jahren geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Zwecke (siehe Abschnitt „Anwendungsgebiete“).

PFLEGE

Handwäsche in lauwarmem Wasser mit milder Seife; gründlich ausspülen. Zum Trocknen von Wärmequellen fernhalten. Nicht in der Umwelt entsorgen.

VORSICHTSMAGNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Das Produkt darf keinen Druck auf verletzte, geschwollene oder geschwollene Körperteile ausüben. Wenden Sie sich an Ihr Geschäft oder an WEPERE, wenn Sie Zweifel an der Anwendung haben. Halten Sie das Produkt beim Tragen von offenen Flammen fern.

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG

Im Interesse einer kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung zur Gewährleistung der bestmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von WEPERE-Produkten bitten wir Sie, alle schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen, die während der Verwendung des Produkts auftreten, per E-Mail zu melden: quality@iacer.it

Melden Sie den Vorfall auch den zuständigen Behörden.

WARNHINWEISE

Die Anwendung muss mit äußerster Sorgfalt erfolgen, um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Im Falle struktureller oder sonstiger Veränderungen sind die Wirksamkeit und die Garantie des Produkts nicht gewährleistet. Der persönliche Gebrauch des Produkts wird empfohlen. Der direkte Kontakt des Produkts mit der Haut kann bei sehr empfindlichen Personen zu Reizungen oder Rötungen führen. Tragen Sie das Produkt nicht auf verletzter Haut. Wenden Sie sich im Falle einer Unverträglichkeit sofort an Ihren Arzt.

ENTSORGUNG

Nicht in der Umwelt entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Abfallgesetzen Ihrer Gemeinde und/oder Ihres Staates.

Vom Produkt geht keine Kontaminationsgefahr aus.

GARANTIE

WEPERE bescheinigt die ordnungsgemäße Konstruktion des Produkts, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Durchführung aller erforderlichen Prüfungen und die Einhaltung der geltenden Normen und Gesetze. WEPERE verpflichtet sich, alle ihr zurechenbaren Mängel, Qualitätsmängel oder Konformitätsmängel der Produkte zu beheben, die innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Lieferung der Produkte auftreten und WEPERE unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels oder der Konformitätsmängel mitgeteilt werden. WEPERE kann entscheiden, ob die Produkte repariert oder ersetzt werden, wenn sie sich als fehlerhaft erweisen. Für ersetzte oder reparierte Produkte, die unter die Garantie fallen, gilt dieselbe Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Reparatur oder Ersatz. Ausgeschlossen von den Konformitätsmängeln und somit von der gesetzlichen Garantie sind Mängel oder Schäden, die durch zufällige Ereignisse oder durch das Verschulden des Benutzers (wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, Nachlässigkeit, fehlende oder falsche Reinigung) oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte oder durch normale Abnutzung entstanden sind. Bewahren Sie Verpackung, Etiketten und Kaufbeleg auf, um die Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten.



Hersteller



Vertriebshändler:



Produkt-Code



Chargennummer



Medizinprodukt



Die
Bedienungsan-
leitung
sorgfältig lesen



Mehrmals (mehrere
Eingriffe) an einem
einzigsten Patienten ver-
wendbares Produkt.



Nicht steril



Achtung