

WEPERE

GARD

GINOCCHIERA ROTULEA

REF WE3103



DESCRIZIONE

Supporto leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione, anche grazie alla steccatura latero/mediale. La struttura in tessuto spacer garantisce tenuta, compressione e una traspirazione al 100%.

Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, è di facile applicazione. Utile anche nell'attività sportiva.

CARATTERISTICHE

- Tessuto SPACER, 100% traspirante.
- Foro rotuleo con rinforzo.
- Steccatura flessibile latero/mediale.
- Fasce di stabilizzazione a velcro
- Ambidestra
- Lunghezza 35 cm.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi posturali o effettuare stabilizzazione degli arti.

INDICAZIONI

Stabilizzazione rotulea • postumi di lussazione della rotula • condromalacia rotulea secondaria ad instabilità rotulea • prevenzione della lussazione della rotula nella pratica sportiva.

APPLICAZIONE

1. Posizionare il tutore con il logo WEPERE rivolto anteriormente e verso l'alto.
2. Indossare il tubolare posizionando la rotula nel foro ed assicurandosi che sia ben centrata.



Lavare a mano in acqua tiepida



Non mettere in asciugatrice



Non stirare



Non candeggiare



Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017
MNGP490-00 del 24/08/2022



I.A.C.E.R. SRL
Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - ITALY
www.wepere.com



TENORTHO SRL
Via Trento e Trieste 100 - 20853 Biassono (MB) - ITALY
www.tenortho.com

POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

Gli ausili di WEPERE sono generalmente indicati per l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. "indicazioni").

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Non disperdere nell'ambiente.

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al proprio negozio di fiducia o a WEPERE nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti WEPERE, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una mail all'indirizzo: quality@iacer.it

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.

AVVERTENZE

L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. In caso di eventuali modifiche strutturali o di altro genere, non sono garantite efficacia e garanzia sul prodotto. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.

GARANZIA

WEPERE certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. WEPERE si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. WEPERE potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e scrinino d'acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.



Fabbricante



Distributore



Codice prodotto



Numero lotto



Dispositivo Medico



Leggere attentamente il manuale d'uso



Dispositivo che può essere utilizzato più volte (più procedure) su un singolo paziente.



Non sterile



Attenzione