



WEPERE

GARD

LUMBALKORSETT

REF WE1110



BESCHREIBUNG

Aufgrund der Struktur aus atmungsaktivem, kalibriertem, elastischem Gewebe eignet es sich zur Kontrolle leichter Pathologien der Lendenwirbelsäule. Einfach anzulegen, mit hervorragender Passform sorgt es für die richtige Stärkung des Rückens und schenkt Wohlbehinden und Entlastung bei den täglichen Vorrichtungen. Geeignet für Sport, einschließlich Wassersport, dank der wasserabweisenden Eigenschaften des Gewebes.

MERKMALE

- SPACER-Gewebe, 100% atmungsaktiv.
- Klettverschluss am Rücken
- Elastische Zuggurte am Rücken
- Integrierte modellierbare Stäbe zur Stärkung des Lendenbereichs
- Vordere Höhe 18 cm, hintere Höhe 25 cm

BESTIMMUNGSZWECK

Nicht-invasive therapeutische Medizinprodukte zur Korrektur von Haltungsschäden.

INDIKATIONEN

Prävention • Schmerzen im unteren Rückenbereich • Ischias im Lendenwirbelbereich • Muskelkontrakturen • Unterstützung in Sport und Alltag • leichte Traumata der Lendenwirbelsäule • Spondyloarthrose • Diskopathien • Lendenwirbelkollaps • Rückenschmerzen im Auto.

ANWENDUNG

Es ist ratsam, die Bandage über einem T-Shirt zu tragen.

1. Öffnen Sie das Korsett vollständig.
2. Vordere Bereich bestehend aus 3 Klettverschlüssen (1 „großes“ Bauchklettband, 2 seitliche „kleine schräge“ Klettbinden).
3. Ziehen Sie das Korsett an und schließen Sie das Klettband im Bauchbereich gerade so weit, dass es gut stabilisiert wird.
4. Positionieren Sie zunächst die Klettbinden der Zuggurte, indem Sie sie an den schrägen seitlichen Klettbinden befestigen.
5. Nehmen Sie die Klettbinden der Zuggurte und ziehen Sie sie bis zum großen Bauchklettband und fixieren Sie sie in der Mitte.
6. Für eine korrekte Positionierung ist darauf zu achten, dass die hintere Unterkante des Korsetts etwa 5 cm über der Mitte des Gesäßes liegt.



Handwäsche
in lauwarmem
Wasser



Nicht im Wasche-
trockner
trocknen



Nicht bügeln



Nicht bleichen



Das Produkt entspricht der EU-Verordnung 745/2017
MNGP503-00 vom 24/08/2022



I.A.C.E.R. SRL
Via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - ITALIEN
www.wepere.com



TENORTHO SRL
Via Trento e Trieste 100 - 20853 Biassono (MB) - ITALIEN
www.tenortho.com

PATIENTENPOPULATION UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

WEPERE-Stützprodukte sind in der Regel für Erwachsene über 12 Jahre geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebenen Zwecke (siehe Abschnitt „Anwendungsgebiete“). Zur Verwendung des Korsetts bei schwangeren Frauen wird Vorsicht und ärztliche Beratung empfohlen. Ebenso sollte Patienten mit Erkrankungen oder Schwierigkeiten der Atemwege besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

PFLEGE

Handwäsche in lauwarmem Wasser mit milder Seife; gründlich ausspülen. Zum Trocknen von Wärmequellen fernhalten. Nicht in der Umwelt entsorgen.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Das Produkt darf keinen Druck auf verletzte, geschwollene oder geschwollene Körperteile ausüben. Wenden Sie sich an Ihr Geschäft oder an WEPERE, wenn Sie Zweifel an der Anwendung haben. Halten Sie das Produkt beim Tragen von offenen Flammen fern.

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG

Im Interesse einer kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung zur Gewährleistung der bestmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von WEPERE-Produkten bitten wir Sie, alle schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen, die während der Verwendung des Produkts auftreten, per E-Mail zu melden: quality@iacer.it. Melden Sie den Vorfall auch den zuständigen Behörden.

WARNHINWEISE

Die Anwendung muss mit äußerster Sorgfalt erfolgen, um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Im Falle struktureller oder sonstiger Veränderungen sind die Wirksamkeit und die Garantie des Produkts nicht gewährleistet. Der persönliche Gebrauch des Produkts wird empfohlen. Der direkte Kontakt des Produkts mit der Haut kann bei sehr empfindlichen Personen zu Rötungen oder Reizungen führen. Tragen Sie das Produkt nicht auf verletzter Haut. Wenden Sie sich im Falle einer Unverträglichkeit sofort an Ihren Arzt.

ENTSORGUNG

Nicht in der Umwelt entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Abfallgesetzen Ihrer Gemeinde und/oder Ihres Staates. Vom Produkt geht keine Kontaminationsgefahr aus.

GARANTIE

WEPERE bescheinigt die ordnungsgemäße Konstruktion des Produkts, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Durchführung aller erforderlichen Prüfungen und die Einhaltung der geltenden Normen und Gesetze. WEPERE verpflichtet sich, alle ihr zurechenbaren Mängel, Qualitätsmängel oder Konformitätsmängel der Produkte zu beheben, die innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Lieferung der Produkte auftreten und WEPERE unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung des Mangels oder der Konformitätsmängel mitgeteilt werden. WEPERE kann entscheiden, ob die Produkte repariert oder ersetzt werden, wenn sie sich als fehlerhaft erweisen. Für ersetzte oder reparierte Produkte, die unter die Garantie fallen, gilt dieselbe Garantie von 6 (sechs) Monaten ab Reparatur oder Ersatz. Ausgeschlossen von den Konformitätsmängeln und somit von der gesetzlichen Garantie sind Mängel oder Schäden, die durch zufällige Ereignisse oder durch das Verschulden des Benutzers (wie zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, Nachlässigkeit, fehlende oder falsche Reinigung) oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte oder durch normale Abnutzung entstanden sind. Bewahren Sie Verpackung, Etiketten und Kaufbeleg auf, um die Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten.



Hersteller



Vertriebshändler:



Produkt-Code



Chargennummer



Medizinprodukt



Die
Bedienungs-
anleitung
sorgfältig lesen



Mehrmals (mehrere
Eingriffe) an einem
einzigsten Patienten ver-
wendbares Produkt.



Nicht steril



Achtung