



VIGGO

Der gute **Druck** für Ihren **Sport**.

WEPERE

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	4
KONTRAINDIKATIONEN	4
WARNUNGEN	4
VORSICHTSMASSNAHMEN	5
FAQs	6
SPEZIFIKATIONEN	8
KENNZEICHNUNG	9
STÖRUNGSSUCHE	10
PRODUKTBESCHREIBUNG	11
BETRIEBSANLEITUNG	12
HINWEIS NACH DER BENUTZUNG	14
REINIGUNG	14
LAGERUNG UND WARTUNG	14
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG	15
GARANTIE	15
GARANTIE	15
LIEFERUMFANG	16
HERSTELLER	17
EINFÜHRER	17

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und korrekten Gebrauch des wiederaufladbaren Luftkompressions-Regenerationssystems zu gewährleisten.

KONTRAINDIKATIONEN

Unerwünschte Wirkungen können auftreten, wenn das Gerät in den folgenden Situationen oder bei Personen verwendet wird, die an den folgenden Krankheiten und Zuständen leiden:

- Menschen mit implantierbaren medizinischen Geräten;
- Menschen, die an Lungenödem, Herzinfarkt, Phlebokarzinom, Bluthochdruck und hohem Fieber leiden;
- Menschen, die an Verbrennungen, Dermatitis, eitrigen Wunden, bösartigen Tumoren usw. leiden;
- Personen, die sich einer Hautoperation im Behandlungsbereich unterzogen haben;
- Menschen mit schweren Kreislaufproblemen, wie Arterienverkalkung, Angina pectoris, Herzinfarkt usw.;
- Menschen mit Verdacht auf Blutgerinnsel;
- Menschen mit schweren Fehlbildungen oder Träger von Prothesen (oder anderen Fixierungsvorrichtungen) im Behandlungsbereich;
- Unmittelbar nach einem chirurgischen Eingriff zur Behandlung von Krampfadern;
- Benutzer, die sich gerade einer Operation unterzogen haben, schwangere Frauen, Kinder.

Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit der Behandlung mit dem Gerät beginnen.

WARNUNGEN

Änderungen an diesem Gerät sind nicht zulässig.

1. Wenn Sie während der Anwendung starke Schmerzen oder ungewöhnliche Symptome verspüren oder die Manschetten im Notfall entfernen möchten:
 - Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät auszuschalten oder trennen sie die Schläuche;
 - Ziehen Sie die Ärmel aus und konsultieren Sie Ihren Arzt.
2. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, wenn Sie an einer der folgenden Erkrankungen leiden:
 - Eine Entzündung, eine Infektion, Schmerzen unbekannter Ursache an oder in der Nähe der Anwendungsstelle;
 - Knochenbrüche oder Verrenkungen an oder in der Nähe der Anwendungsstelle haben;
 - Sie befinden sich in medizinischer Behandlung oder haben eine

- Kontraindikation, die die Verwendung eines medizinischen Kontrollgeräts erfordert;
- Verwendung von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten, die empfindlich auf elektrische Störungen reagieren;
 - Sie leiden an bösartigen Tumoren;
 - Sie leiden an einer Herzerkrankung;
 - Sie leiden an Osteoporose;
 - Schwere periphere Neuropathie oder Sensibilitätsstörungen aufgrund von Diabetes;
 - Sie sind aufgrund von Traumata am Körper nicht für die Massage geeignet.
3. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die nicht in der Lage sind, es selbständig zu benutzen.
 4. Verwenden Sie keine anderen Netzteile als das Original.
 5. Das Netzkabel des Netzteils darf nicht zerkratzt, beschädigt, bearbeitet, übermäßig gebogen, gezogen oder verdreht werden. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
 6. Es darf nicht verwendet werden, wenn das Netzteil defekt oder der Stecker lose ist.
 7. Stecken Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen ein oder aus.
 8. Legen Sie das Steuergerät nicht in die Bettdecke und verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen.
 9. Es ist verboten, ohne Genehmigung Änderungen an dem Gerät vorzunehmen, es zu zerlegen oder zu reparieren. Falls erforderlich, senden Sie uns eine E-Mail an service@iacer.it

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Verwenden Sie nur das mit dem System gelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zu einem fehlerhaften Betrieb des Systems führen.
2. Verwenden Sie es nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten.
3. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen.
5. Laufen Sie nicht herum, wenn Sie VIGGO verwenden oder die Ärmel tragen.
6. Lassen Sie das System, das Netzteil und das Zubehör nicht an Orten liegen, an denen es durch Kinder, Haustiere, Ungeziefer oder Flüssigkeiten beschädigt werden könnte.
7. Die Anbaugeräte sind so konzipiert, dass sie jeweils nur von einer Person benutzt werden können.

FAQs


Q1: Wie funktioniert VIGGO?

A1: VIGGO ist ein Luftkompressionsgerät mit 4 Luftkammern (Fuß, untere Wade, obere Wade und Oberschenkel), die in einer ausgeklügelten Abfolge aufgeblasen und entleert werden, um das Kneten und Massieren mit den Händen zu stimulieren, die Durchblutung im ganzen Körper zu maximieren, Muskelkater und/oder Schmerzen in den behandelten Bereichen zu verringern und die Durchblutung zu verbessern.

F2: Wie viele Massage Modi gibt es, und worin besteht der Unterschied?


A2: Es gibt 3 Massage-Modi, bitte achten Sie auf den Unterschied wie unten.

Modus 1: SEQUENZ-MODUS

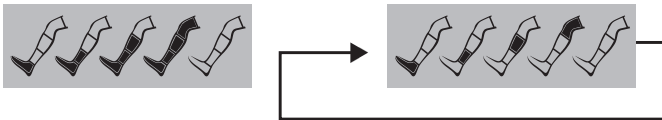


Der punktuelle und sequentielle Druck eignet sich zur Entspannung der Muskeln, die allmählich von den Füßen zum Körper hin zusammengedrückt werden. Nützlich für eine entspannende Massage für die Beine oder zum Aufwärmen (10-15 Minuten), ohne den Muskeltonus zu sehr zu reduzieren.

Modus 2: ZIRKULATIONSMODUS

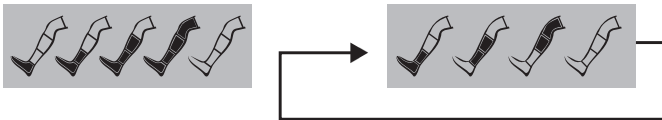

Es bleiben immer zwei Kammern gleichzeitig aufgeblasen, was einen Rückfluss verhindert und den Abtransport von Laktat intensiv fördert. Dieses Programm ist für eine schnelle, aber intensive Erholungsphase geeignet.

Modus3: KOMBINATIONSMODUS

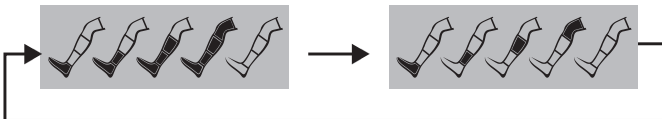

Dieses Programm kombiniert eine progressive Kompression mit einer sequentiellen: es kann sehr nützlich sein, um die Muskeln zu entspannen.

F3: Muss das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen werden, wenn VIGGO verwendet wird?

A3: Nein, VIGGO hat einen wiederaufladbaren Akku, den Sie überall verwenden können. Ein voll aufgeladener Akku kann bis zu 3 Stunden halten (je nach Modus und Intensität).

F4: Was soll ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass die Massage zu schwach oder zu stark ist?

A4: Die Intensität reicht von 40mmHg bis 200mmHg, bitte wählen Sie die Intensität, die für Sie geeignet ist. Die Massage muss angenehm und niemals schmerzhaft sein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Intensität auch bei der niedrigsten Einstellung zu stark ist, hören Sie bitte auf, das Gerät zu benutzen, und konsultieren Sie vor der nächsten Anwendung Ihren Arzt.

F5: Wie lange sollte ich VIGGO verwenden?

A5: Es wird empfohlen, die Massage ein- oder zweimal am Tag für jeweils nicht mehr als 30 Minuten durchzuführen. Sie können es aber auch länger anwenden, wenn Sie sich zu müde fühlen und eine längere Massage wünschen, um den Schmerz zu lindern.

F6: Warum befindet sich auf der Rückseite des Controllers eine Abdeckung??

A6: Die hintere Abdeckung kann verwendet werden, um in die Luftschlauchanschlussöffnungen ein weiterer Luftschlauch einzuführen, so dass die einzelnen Schläuche separat arbeiten können.

F7: Kann ich auch nur ein Bein verwenden?

A7: Ja, das können Sie. Verwenden Sie Silikonkautschuk, um eines der Luftlöcher zu verschließen, dann können Sie eine der Manschetten am gewünschten Bein tragen. Wir empfehlen, beide Manschetten gleichzeitig zu verwenden, um eine bessere Wirkung zu erzielen.

F8: Warum macht VIGGO Geräusche?

A8: Das Geräusch kommt von der arbeitenden Luftpumpe im Steuergerät, die die Airbags in den Manschetten kontinuierlich mit Luft versorgt, es ist ein leises Geräusch und ein normales Phänomen.

F9: Wann sollte ich VIGGO verwenden?










A9: Dieses Produkt fördert die Durchblutung und beseitigt effektiv Muskelkater und Müdigkeit, so dass Sie es jederzeit verwenden können. Sie können es vor dem Training verwenden, um Ihre Muskeln aufzuwärmen, nach dem Training, um sich besser und schneller zu erholen, oder wenn Sie nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommen.

Spezifikationen





Modell	S9061B
Name	VIGGO
Ladegerät	AC-Eingang: 100~240 Volt, AC 50/60 Hz, DC Ausgang: 12V 2A
Nennleistung	24W
Komprimierungsmodus	3 Modi: Sequenz, Zirkulation, Kombination
Intensitätsstufen / Pressure Renge	40-200 mmHg
Zeit	15-60 Minuten
Gewicht des Produkts	2,92 Kg
Gewicht der Verpackung	4,38 Kg
Typ der Hülse	4 Kammern: Fuß/untere Wade/obere Wade/Oberschenkel
Batterie	2500 mAh 3 Stunden Nutzungsdauer 2,5 Stunden Ladezeit
Beinlinge Größe S/M	Schrittlänge: 84cm; Maximale Oberschenkelweite: 72cm; Maximale Fußweite: 35,5cm
Beinlinge Größe L/XL	Schrittlänge: 92cm; Maximale Oberschenkelweite: 80cm; Maximale Fußweite: 38cm

Kennzeichnung




	Logo des Importeurs
	CE-Kennzeichnung
	Herstellerdaten
	Daten des Importeurs
	Siehe Benutzerhandbuch
	Zulässige Temperaturen (Lagertemperaturen, auf der Verpackung)
	Relative Luftfeuchtigkeit (relative Lagerfeuchtigkeit, auf der Verpackung)
	WEEE-Richtlinie zur Entsorgung von Elektronik- und Elektroschrott
	Gerät entspricht der Richtlinie 2011/65/UE (RoHS 2), geändert durch die Delegierte Richtlinie (UE) 2015/863 (RoHS 3)

Störungssuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Funktioniert nicht und der Bildschirm ist ausgeschaltet	Der Strom ist nicht eingeschaltet	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.
	Die Batterie ist erschöpft	Laden Sie den Akku vollständig auf.
	☹ Wenn Sie den Netzschalter einschalten, aber nicht die Taste Start/Pause drücken,  zu beginnen, schaltet sich das Steuergerät nach 2 Minuten ab.	Drücken Sie zum Starten die  Taste Start/Pause
Der Bildschirm ist eingeschaltet, aber die Manschetten funktionieren nicht	Nur ein Muffenluftschlauch ist mit dem Controller verbunden	Verbinden Sie 2 Muffen-Luftschläuche (oder 1 Muffen-Luftschlauch und die hintere Abdeckung des Steuergeräts) mit dem Steuergerät
	Luftschläuche sind nicht vollständig angeschlossen	Vergewissern Sie sich, dass die Luftschläuche richtig und vollständig mit dem Steuergerät verbunden sind. (Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem Knopf die "UP"-Seite ist)
	Drücken Sie die Taste  Start/Pause, um die Nutzung zu unterbrechen.	Drücken Sie zum Starten die  Taste Start/Pause
	Die Ärmel sind beschädigt	Prüfen Sie, ob die Muffen ein Luftleck haben. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, indem Sie uns eine E-Mail an service@iacer.it schicken.
Abbruch während des Betriebs oder Stoppen des Pumpvorgangs	Die Batterie ist erschöpft	Bitte laden Sie den Akku vollständig auf
	Die Behandlungszeit ist abgelaufen	Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die voreingestellte Zeit abgelaufen ist; drücken Sie die Einschalttaste, um eine neue Sitzung zu beginnen, falls erforderlich


Produktbeschreibung

Kontrolleinheit

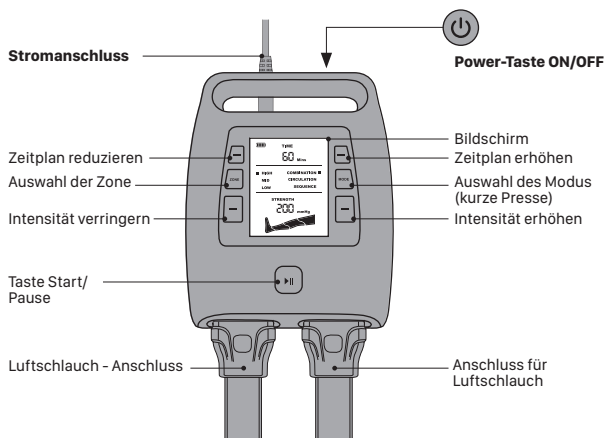


Bildschirm

Anzeige der aktuellen Einstellung und des Arbeitsstatus (Restzeit und Druckbereich)

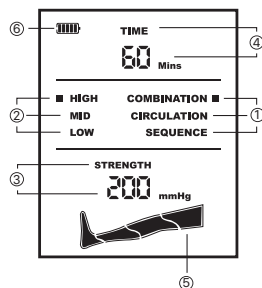


- ① Aktueller Modus
- ② Aktuelle Stärke
- ③ Aktueller Druck
- ④ Verbleibende Zeit
- ⑤ Kompressionskammer
- ⑥ Batteriebetrieb

Massage-Manschette

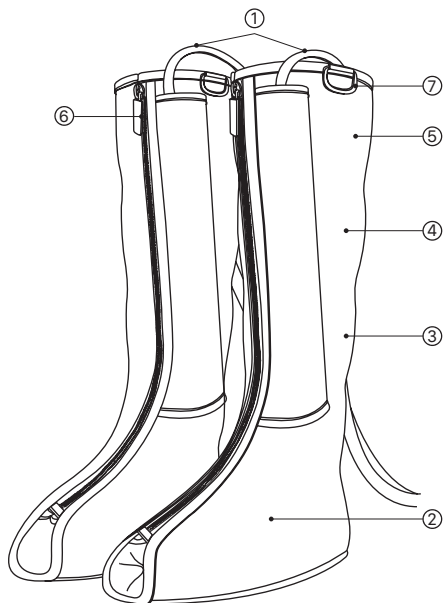

Adapter

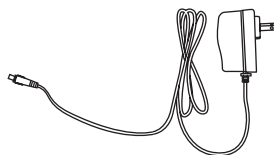


- ① Hülse
 - ② Schlauchanschluss
 - ③ Fußluftkammer Untere
 - ④ Wadenkammer Obere
 - ⑤ Wadenkammer Untere
 - ⑥ Oberschenkelkammer
 - ⑦ Reißverschluss
- D Schnalle: Manschette aufhängen oder als Tragehilfe


Betriebsanleitung

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt VIGGO verwenden. Um eine bessere Massage zu erhalten, verwenden Sie es bitte gemäß der Anleitung.


1. Vergewissern Sie sich, dass beide Luftschläuche in den Controller eingesteckt sind, diese Seite ist "UP".

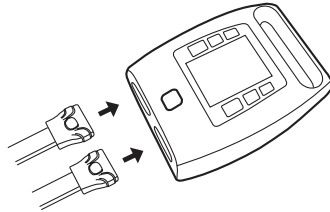

Option Batteriebetrieb

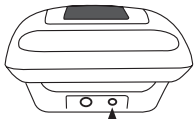


DC-Ladeanschluss

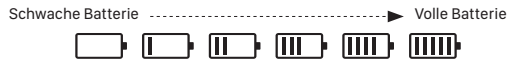

- a. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch 2-2,5 Stunden lang vollständig auf.
- b. Zum Laden des Akkus:
 - Schließen Sie den Adapter an den Gleichstrom-Ladeanschluss an der Basis des Steuergeräts an.
 - Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
- c. Die Batterieanzeige auf dem Bildschirm der Steuerung zeigt den aktuellen Batteriestand an.
- d. Status der Batterie:
 - Wenn der Akku leer ist, zeigt die Batterieanzeige nichts an und das Gerät schaltet sich aus.
 - im geladenen Zustand blinkt die Batterieanzeige ständig.
 - Wenn die Batterie vollständig geladen ist, hört die Batterieanzeige auf zu blinken.
- e. Bevor Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte vollständig auf.
Es wird empfohlen, das Gerät alle 5 Monate aufzuladen, um eine Beschädigung der Batterie durch Stromausfälle zu vermeiden.

2. Ziehen Sie die Ärmel richtig über Ihr Bein. Es gibt keinen Links-Rechts-Unterschied zwischen den Ärmeln.

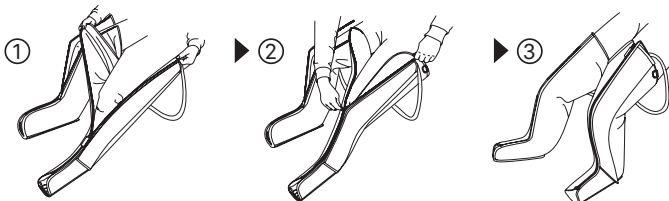

- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Tragen, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist.

Versuchen Sie niemals, das System zu benutzen, wenn der Reißverschluss teilweise oder ganz geöffnet ist.


- Sie können die D-Schnalle an der Oberseite der Manschette verwenden, um das Anziehen zu erleichtern

3. Suchen Sie sich eine bequeme Position im Sitzen, im Liegen oder im Stehen.


🔌 Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt.

1) Es ertönt ein "Di", der Bildschirm leuchtet auf und zeigt die aktuelle Einstellung an. 🖱️ Drücken Sie zum Starten die Taste Start/Pause.

2) Es beginnt mit der Standardeinstellung von: Modus 1 (Sequenzmodus), die Intensität beträgt 60mmHg, 30 Minuten Zeit.

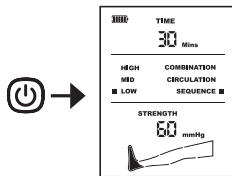


4. 🗄️ Drücken Sie die Taste, um den Massagemodus zu ändern. 3 Modi optional, siehe den Unterschied in den FAQs A2 Session.

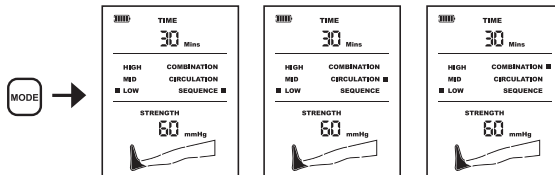


5. 📍 Drücken Sie die Taste, um die Zone auszuwählen, die Sie massieren möchten, es kann die Steigerung nur für eine Zone begrenzen, die Sie massieren möchten.


🗄️ Wenn Sie das ganze Bein wieder massieren möchten, drücken Sie bitte die Taste, um die volle Beinmassage zu genießen.

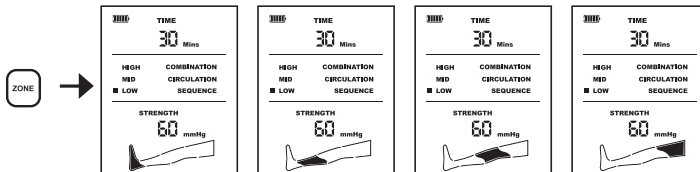

6. (-) (+) Drücken Sie die Intensitätstaste, um die Intensität des Luftdrucks einzustellen. 40mmHg-200mmHg können gewählt werden. Wir empfehlen Ihnen, bei der ersten Verwendung mit einer niedrigen Intensität zu beginnen und diese nach und nach zu erhöhen, nachdem Sie sich daran gewöhnt haben.

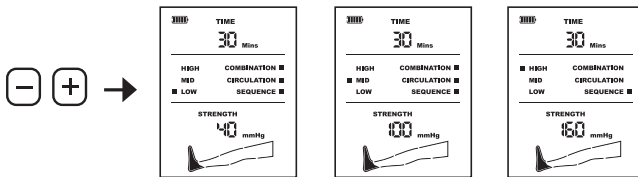


7. **- +** Drücken Sie die Zeittaste, um die Zeit zu ändern. Sie haben die Wahl zwischen 15 und maximal 60 Minuten Behandlungszeit. Die Zeit kann jederzeit angepasst werden, während die Sitzung läuft.

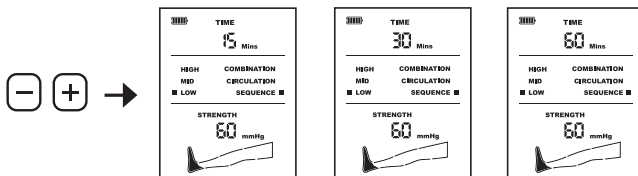

8. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Behandlungszeit automatisch ab. Sie können jederzeit die Einschalttaste drücken, wenn Sie mehr genießen oder die Massage früher beenden möchten..

Hinweis nach der Benutzung

1. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie das Steuergerät durch Drücken der Einschalttaste aus und ziehen Sie dann den Adapter sowohl vom Steuergerät als auch von der Steckdose ab.
2. Trennen Sie den Schlauch von der Steuereinheit, indem Sie den Knopf auf der Oberseite drücken und ihn abziehen.
3. Verpacken Sie das gesamte Zubehör in der Originalverpackung oder in der Aufbewahrungstasche..

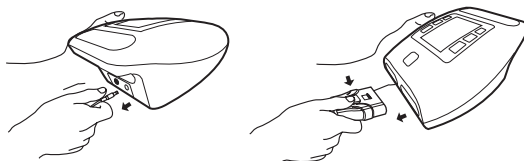

Reinigung

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie das Gerät reinigen.

1. Bei Verschmutzung wischen Sie bitte das Steuergerät, die Hülsen und die Schläuche mit einem feuchten, sauberen Tuch ab.
2. Verwenden Sie zum Abwischen des Geräts kein Benzin, keinen Alkohol, keine
3. Verdünnungsmittel oder andere reizende Flüssigkeiten, da diese zu Fehlfunktionen oder Be-

schädigungen und Verfärbungen der Bauteile führen können.

4. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schläuche gelangen.
5. Nicht chemisch reinigen.

Lagerung und Wartung

1. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Es hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Service oder Reparaturen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter **service@iacer.it**
2. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die nicht in der Lage sind, es selbständig zu benutzen.
3. Setzen Sie es nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
4. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie es, dass Nadeln die Ärmel und Schläuche durchstechen.
6. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
7. Halten Sie die offenen Anschlüsse des Steuergeräts, die Schlauchverbindung und die Stromzufuhr frei von Verunreinigungen.
8. Achten Sie darauf, dass sich keine Flusen oder Staub auf dem Steuergerät oder den Schlauchverbindungen ansammeln. Wenn sich Fusseln oder Staub ansammeln, wischen Sie das System vor der Verwendung mit einem trockenen Tuch ab.
9. Verwenden und lagern Sie VIGGO gemäß den nachstehenden Angaben:

Betriebsbedingungen	Temperatur: +5° bis 40°C (41° bis 104°F) Luftfeuchtigkeit: 5% bis 85% nicht kondensierend Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa
Lagerungsbedingungen	Temperatur: von -20° bis 40°C Luftfeuchtigkeit: 30% bis 85% nicht kondensierend Luftdruck: 75 kPa bis 106 kPa Trocken halten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Informationen zur Entsorgung

Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss bei den Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte sowie für Batterien abgegeben werden. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Abfälle die örtlichen Vorschriften.

Garantie

VIGGO hat eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum für das ARYA-Gerät, vorausgesetzt, die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung werden strikt befolgt. Die Verschleißteile (Druckband) sind ausgeschlossen von der Garantie

ausgeschlossen, es sei denn, es liegen offensichtliche Herstellungsfehler vor. Die Garantie erlischt, wenn: das Gerät in irgendeiner Weise verändert oder durch nicht vom Hersteller oder vom Vertragshändler autorisiertes Personal bedient wird.

Sollten Sie die Ware zurückschicken müssen, verpacken Sie das Gerät und das gesamte Zubehör bitte so, dass es beim Transport nicht beschädigt wird. Um die Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss der Käufer dem Gerät eine Kopie des Kaufbelegs beifügen, der die Herkunft des Gerätes belegt und das Kaufdatum. Für weitere Informationen über die Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder Verkäufer, um die in Ihrem Land geltende Norm und den Standard zu überprüfen, oder letztendlich an den Importeur IACER Srl.

Garantie Bedingungen

- 1) Wenn Sie Hilfe benötigen, legen Sie bitte den Kaufbeleg bei, wenn Sie das Gerät an IACER Srl schicken.
- 2) Die Garantiezeit gilt nur für die elektronischen Teile. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder direkt von IACER Srl gewährt.
- 3) Die Garantie deckt nur die Schäden am Produkt ab, die zu dessen Fehlfunktion führen.
- 4) Garantie bedeutet, dass nur die fehlerhaften Komponenten oder Materialien durch Reparatur oder kostenlosen Ersatz abgedeckt sind, einschließlich Handarbeit.
- 5) Die Garantie bezieht sich nicht auf Schäden, die durch Nachlässigkeit oder eine nicht den Anweisungen entsprechende Verwendung, durch Eingriffe am Gerät durch nicht autorisiertes Personal, zufällige Ursachen oder Fahrlässigkeit des Käufers verursacht wurden.
- 6) Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch ungeeignete Netzteile verursacht werden.
- 7) Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile.
- 8) Die Garantie umfasst nicht die Transportkosten, die vom Käufer getragen werden müssen.
- 9) Nach Ablauf der Garantiezeit ist die Garantie nicht mehr anwendbar. In diesem Fall werden die Kosten für den Ersatz der Teile in Rechnung gestellt, die Handarbeit und die Transportkosten.
- 10) Für alle Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht von Venedig zuständig.

Lieferumfang

- 2 beidhändige Massagemanschetten
- 1 Steuergerät VIGGO
- 1 Netzgerät AC 100~240 V, 50/60 Hz, DC 12V 2A
- 1 Benutzerhandbuch
- 1 tragbare Tragetasche

Hersteller

Shenzhen Dongjilian Medical Tech Co, Ltd.

B1/1-5F, Tonglu Industrial Area, 70# Tongxin Road, Tongxin Community, Longgang District,
Shenzhen 518116, Guangdong, China

Einführer

I.A.C.E.R. SRL

Via Enzo Ferrari 2 30037 Scorzè (VE)

iacer@iacer.it – welcome@wepere.com

VIGGO. Alle Rechte vorbehalten. **WEPERE VIGGO** und das Logo sind das exklusive Eigentum.
von **I.A.C.E.R. Srl** und sind eingetragene Marken.
Ausgabe: MNPG561-00 vom 08/04/2024

WEPERE

www.wepere.com

I.A.C.E.R. Srl

via Enzo Ferrari 2 - 30037 Scorzè (VE) - Italia